



DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

Via dell'Amicizia n° 72 Palazzo ex INAM - 80035 Nola (NA)
Corso Alcide De Gasperi n°167 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818223648 - 0818223609 - 0818729811 fax 0818223615

dipfarm@pecaslnapoli3sud.it

Prot. n° UFS 38305 del 6.05.2014

Ai Direttori Sanitari PP.OO. Aziendali
Ai Direttori Sanitari dei Distretti Sanitari

Ai Resp. Centri Diabetologici
Ai Medici di Assistenza Primaria
per il tramite delle rispettive Direzioni

Ai Responsabili FF.OO. e FF.DD.
Ai Farmacisti Convenzionati

E, p.c. Ai Direttore Sanitario
Ai Resp. Serv. Assistenza Ospedaliera
Ai Resp. Serv. Assistenza Distrettuale

LORO SEDI

**Oggetto: Dispositivo Vigilanza – AVVISO URGENTE SULLA SICUREZZA
IMPORTANTE INFORMAZIONE DI PRODOTTO
Strisce Reattive per la determinazione della glicemia
Accu-Check Compact e Accu-Check Mobile - ROCHE DIAGNOSTICS**

Si informa che la ditta Roche Diagnostics ha reso noto un importante avviso di sicurezza relativo all'utilizzo delle strisce reattive Accu-Check Compact e Accu-Check Mobile in pazienti sottoposti a terapia con **CEFTRIAXONE**.

In particolare, l'utilizzo delle strisce Accu-Check Compact e Accu-Check Mobile nei pazienti sottoposti a contemporanea terapia antibiotica con Ceftriaxone potrebbe portare a letture erroneamente ridotte del livello di glucosio nel sangue.

Pertanto, in questi pazienti **deve essere interrotto** l'utilizzo di Accu-Check Compact e Accu-Check Mobile per tutta la durata del trattamento antibiotico ed **utilizzato un diverso sistema** disponibile in commercio per il self-test.

Trattandosi di misure dirette alla tutela della salute dei pazienti, si raccomanda la più ampia diffusione delle informazioni.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

**Il Farmacista Responsabile della Dispositivo Vigilanza
Dott. Adriano VERCELLONE**

Dipartimento Farmaceutico
Il Direttore
dr. Eduardo NAVA